


Anbio/Edelvital Antigen Schnelltest – Zur Eigenanwendung

Kurzanleitung zur Eigenanwendung der Antigen Tests bei Erwachsenen. Bei Personen unter 14 Jahren muss der Test von einem Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. Bitte den Test nicht verwenden, sollte die Verpackung oder einzelne Komponenten beschädigt bzw. bereits geöffnet sein.

Schritt 1: Vorbereitung

- Lesen Sie die Kurzanleitung und die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

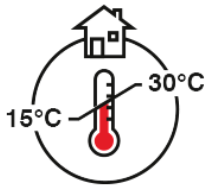

- Bitte bringen Sie den Test auf Raumtemperatur (15°C bis 30°C).
- Waschen Sie Ihre Hände und gegebenenfalls desinfizieren Sie Ihre Hände bevor Sie den Test durchführen.



- Was ist enthalten:
 - 1× Testkassette (verschweißt)
 - 1× Extraktionsfläschchen (0,3 ml – bereits befüllt)
 - 1× Gebrauchsanweisung
 - 1× Steriler Einwegtupfer
 - 1× Kurzanleitung

- Was wird benötigt:
 - Saubere und ebene Unterlage für die Ablage der Testkomponenten
 - Timer (ev. Ihr Smartphone)
 - Verschließbarer Plastik-/Müllbeutel




- Nehmen Sie alle Komponenten heraus und legen Sie diese auf eine saubere und ebene Unterlage.
- Öffnen Sie die Verpackung der Testkassette und legen diese wieder auf die saubere und flache Unterlage mit der Schrift nach oben.



Schritt 2: Probennahme

- Den Einwegtupfer erst unmittelbar vor der Probenentnahme aus der Verpackung nehmen. Den Einwegtupfer nicht ablegen oder verunreinigen. Bitte die saugfähige Spitze des Einwegtupfers nicht berühren.

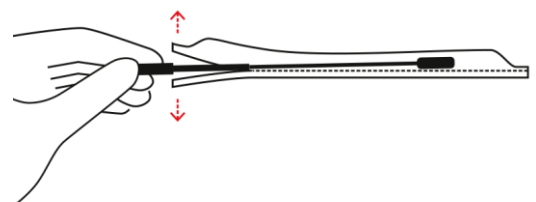


- Sie können zwischen zwei Probentypen zur Entnahme wählen (bitte vor dem Test entscheiden, welche der beiden Arten – bitte auch nur eine Art der Probengewinnung durchführen):

- **Anteriore Nasentupfer Proben:**

Die Probe wird mittels des sterilen Einwegtupfer aus dem vorderen Nasenbereich entnommen. Zur Probenentnahme wird lediglich die saugfähige Spitze des Einwegtupfer vorsichtig in Ihr Nasenloch eingeführt (ca. 2,5 cm). Drehen Sie den Einwegtupfer dabei in einer kreisförmigen Bewegung gegen die Innenseite Ihrer beiden Nasenlöcher (je Nasenloch ca. 5 Drehbewegungen).


Bitte darauf achten, dass der Einwegtupfer an der Nasenwand gut anliegt und ausreichend Probenmaterial gewonnen wird.

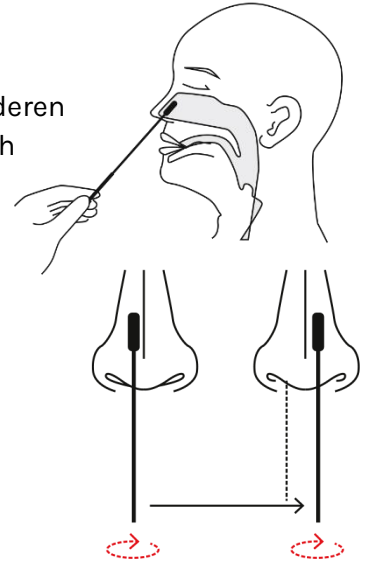

ODER


- **Speichelproben / „Lollipop“:**

Husten Sie tief und machen Sie ein Geräusch aus dem Rachen heraus. Legen Sie dann den Tupfer (saugfähige Spitze) auf Ihre Zunge. Schließen Sie den Mund und halten Sie den Tupfer für 20 Sekunden im Mund und befeuchten Sie diesen ordentlich mit Speichel. Bitte achten Sie darauf, dass ausreichend Speichel auf der saugfähigen Spitze gesammelt wird.

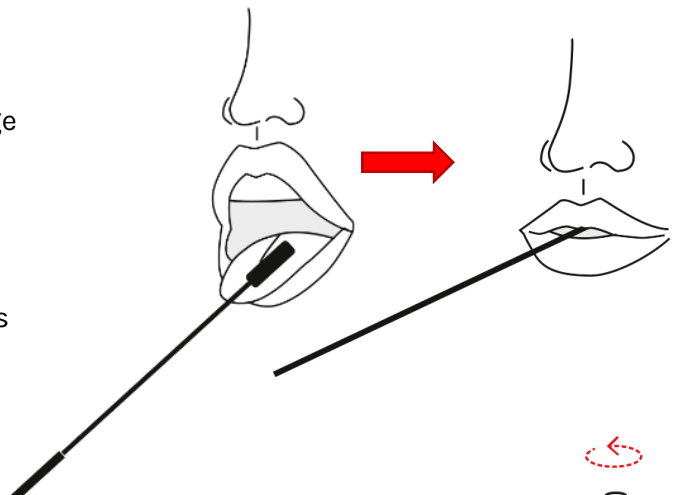


Schritt 3: Extraktion der Proben

- Öffnen Sie das Extraktionsfläschchen (großer Verschluss), bitte gehen Sie vorsichtig damit um und achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht verschüttet wird.

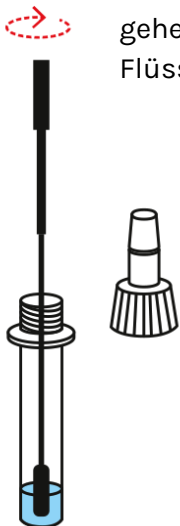

- Stecken Sie nun die saugfähige Spitze des Einwegtupfers in das zuvor geöffnete Extraktionsfläschchen und tauchen diesen in die Extraktionsflüssigkeit ein. Drücken Sie den Tupferkopf mit dem Probenmaterial fest gegen die Innenwand des Extraktionsfläschchen, während Sie den Tupfer etwa 10 Sekunden lang (10-15 Mal) im Extraktionsfläschchen drehen.

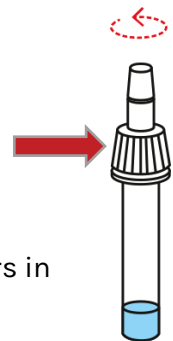


Schritt 4: Entfernen des Tupfers

- Ziehen Sie nun vorsichtig den Einwegtupfer so weit aus dem Extraktionsröhrchen, bis die Sollbruchstelle (Verengung) auf dem Stiel des Einwegtupfers leicht aus dem Fläschchen ragt.




- Brechen Sie nun den Stiel des Einwegtupfers an der Sollbruchstelle ab und lassen Sie den Tupferkopf in dem Fläschchen.
- Den abgebrochenen Stiel bitte in den vorbereiteten Plastikbeutel geben.
- Schrauben Sie nun den Verschluss des Extraktionsfläschchen wieder auf das Fläschchen und verschließen dieses fest. Der große Verschluss ist nun wieder geschlossen.

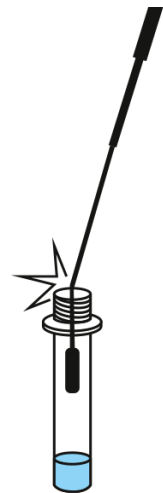

Schritt 5: Testen



- Öffnen Sie nun den oberen Deckel (kleiner Schraubverschluss) des Extraktionsfläschchen und legen den Deckel beiseite.
- Geben Sie nun die exakte Anzahl Tropfen der Probenflüssigkeit
- (2 Tropfen für die Nasentupfer Probe ODER 3 Tropfen für die Speichelprobe) in die Probenvertiefung der vorbereiteten Testkassette (die Probenvertiefung ist auf der Testkassette mit „S“ gekennzeichnet).

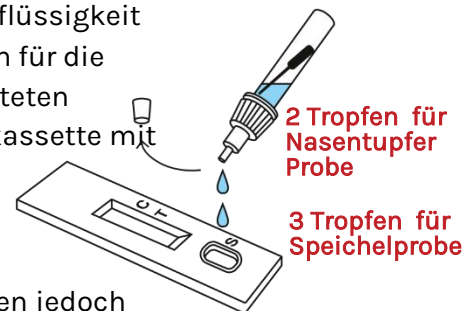

- Sollten zu wenige Tropfen hinzugefügt werden, bitte vorsichtig einen weiteren Tropfen hinzufügen, sollten jedoch fälschlicherweise mehr Tropfen hinzugefügt werden als angegeben, bitte den gesamten Test in den vorbereiteten Plastikbeutel geben und entsorgen (sh. Punkt Entsorgung) und mit einem neuen Test von vorne starten.



- Schließen Sie das Extraktionsfläschchen wieder.
- Starten Sie einen Countdown (z.B. auf Ihrem Smartphone) und warten Sie 15 Minuten bis zum Ablesen der Ergebnisse.



Schritt 6: Ablesen der Ergebnisse

- Lesen Sie das Testergebnis 15 Minuten nach dem Eintropfen der Probenflüssigkeit ab, jedoch nicht später als 20 Minuten.



Negativ



Positiv



ungültiger Test

Schritt 7: Bedeutung der Ergebnisse

- **Negativ:**
Der Antigentest weist ein negatives Testergebnis auf.
- **Positiv:**
Bitte handeln Sie nach den aktuellen lokalen Vorschriften. Diese sind (Stand 7. Mai 2021)
z.B.:
 - Ist der Test positiv, muss ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden, um sicher zu sein, dass das Ergebnis richtig ist. Rufen Sie daher umgehend 1450 an.
 - Bleiben Sie zu Hause in Quarantäne, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Nutzen Sie zur Fahrt zum Testen (Labor, Arzt oder Testzentrum) nicht die öffentlichen Verkehrsmittel.
 - Bei einem Laientest für zu Hause gibt es derzeit keine Meldepflicht, daher kommt es hier auf Ihre Eigenverantwortung an. Vermeiden Sie durch verantwortungsvolles Handeln die Ansteckung Dritter!
- **Ungültig:**
Der Antigentest wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt, bitte den gesamten Test in den vorbereiteten Plastikbeutel geben und entsorgen (sh. Punkt Entsorgung) und mit einem neuen Test von vorne starten.

Schritt 8: Entsorgung

- Legen Sie alle Komponenten in einen verschließbaren Plastikbeutel. Verschließen Sie den Beutel fest und entsorgen Sie diesen gemäß lokalen Vorschriften.



Vertrieben durch:

EDELVITAL™

Gregor Mendel Straße 46,

A-1190 Vienna,

TEL: +43 1 523 3000

Email: info@edelvital.com

Version: 19. Mai 2021